

# Anaftin® Baby

## Gel gingival

Anaftin® Baby Gel gingival este un gel oral bioadeziv. Acesta formează rapid o peliculă invizibilă care protejează gingia de disconfort și durere. Componentele sale naturale contribuie la reducerea durerii și a roșeții în zonele afectate.

Aplicatorul este prevăzut cu peri din silikon care masează ușor gingiile ameliorând astfel disconfortul și simptomele asociate erupției dentare.



Anaftin® Baby Gel gingival nu conține anestezice locale, medicamente, alcool sau zahăr. Anaftin® Baby Gel gingival nu produce o senzație de arsură la aplicare și are un gust plăcut de banane.

### Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați o cantitate suficientă de gel pentru a acoperi zona afectată și masați ușor gingia cu aplicatorul.

Este preferabil ca gelul să fie aplicat după mese și înainte ca bebelușul să adoarmă pentru a stimula formarea peliculei și a prelungi ameliorarea durerii micilor pacienți. Utilizați ori de câte ori este necesar. După fiecare utilizare, înșurubați la loc capacul. Îndepărtați orice rest de produs care ar putea împiedica următoarea aplicare a gelului.

### Compoziție:

Apă, PVP, maltodextrină, propilenglicol, ulei de ricin hidrogenat PEG-40, *Aloe barbadensis*, gumă xantan, aromă, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, EDTA disodic, hialuronat de sodiu, xilitol, clorură de cetilpiridiniu, acid gliciretinic, *Crocus sativus*

### Precauții:

Fiecare tub de Anaftin® Baby Gel gingival trebuie utilizat la un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată a aplicatorului și a gelului. Utilizarea Anaftin® Baby Gel gingival este contraindicată în cazul pacienților cu istoric cunoscut de reacții de hipersensibilitate la oricare dintre excipienții produsului. Dacă sunteți gravidă, cereți sfatul medicului.



Product:	Anaftin® Baby		
Product No.:	V109075/01		
Language:	Romanian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. P 648	2. P 7466	3. Magenta
Date:	18.10.16	Weise	BC 16-3069

## Atenționări și precauții:

### ATENȚIE:

Produsul trebuie aplicat numai de către o persoană adultă.  
Acest dispozitiv medical nu este o jucărie! NU lăsați copilul să se joace cu el! Risc de înecare!  
Verificați dispozitivul medical înainte de a-l utiliza, urmărind orice semn de uzură și aveți grijă ca pe durata aplicării gelului nicio parte a capului aplicator să nu se detașeze accidental. Dacă se întâmplă acest lucru, nu mai utilizați dispozitivul.  
Nu încercați să reasamblați piesa detașată.  
Nu mai utilizați dispozitivul după epuizarea cantității de gel.  
A nu se utiliza după data de expirare sau în cazul în care tubul pare deteriorat sau curge.  
A se păstra la temperatura camerei, ferit de căldura directă.  
A nu se congela.

### A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

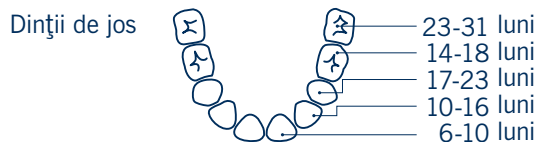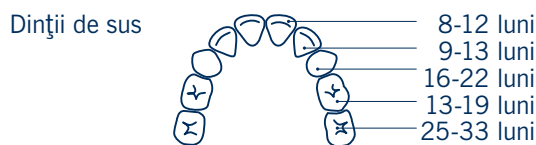

### Conține:

10 ml

### Fabricant:

Alliance Pharma Srl,  
Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italia



### Distribuit de

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germania

Rev 09/2016

RO / V109075/01

Product:	Anafin® Baby		
Product No.:	V109075/01		
Language:	Romanian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. P 648	2. P 7466	3. Magenta
Date:	18.10.16	Weise	BC 16-3069

